

## Il kit Sigvaris ULCER X è estremamente efficace nel trattamento delle ulcere venose alle gambe.



### Obiettivo e disegno dello studio

Lo scopo di questo studio è stato valutare l'efficacia di un kit di calze compressive appositamente sviluppato (kit Sigvaris ULCER X, di seguito denominato ULCER X) per il trattamento delle ulcere venose alle gambe rispetto al normale trattamento con bendaggi a bassa estensibilità. ULCER X è costituito da una sottocalza\* indossata continuamente e una sopra calza\*\* indossata solo durante le ore diurne. I bendaggi a bassa estensibilità sono stati indossati giorno e notte.

### Partecipanti

26 pazienti trattati con ULCER X e 30 pazienti trattati con bendaggi a bassa estensibilità hanno completato lo studio.

### Informazioni sul prodotto

\*Sottocalza 15-20 mmHg

\*\* Sopracalza 23-32 mmHg

La sottocalza e la sopra calza insieme esercitano una compressione pari a ~ 45 mmHg



### Randomizzazione dei pazienti

#### Gruppo 1 ULCER X

4 mesi o fino a guarigione dell'ulcera

- Soggetti eleggibili: n = 30
- Abbandoni: n = 4 (3 pazienti con difficoltà a indossare le calze, 1 paziente si è rifiutato di continuare lo studio)
- Valutazione finale: n = 26



#### Gruppo 2 bendaggi

4 mesi o fino a guarigione dell'ulcera

- Soggetti eleggibili: n = 30
- Abbandoni: n = 0
- Valutazione finale: n = 30



### Risultati

Outcome primari = guarigione dell'ulcera e soddisfazione soggettiva espressa dai pazienti

**ULCER X**

**Cicatrizzazione**  
Completa cicatrizzazione nel 96,2% dei pazienti

**Tempo di guarigione**  
"Ulcera < 4 cm = guarigione due volte più rapida;  
Ulcera > 4 cm = guarigione in tempi equivalenti"

**Qualità di vita**  
Migliore qualità di vita dei pazienti

- ✓ Riduzione del dolore
- ✓ Riduzione del disagio
- ✓ Aumenta dell'attività



### Conclusione

L'uso del kit ULCER X risulta più efficace nella guarigione delle ulcere venose alle gambe rispetto ai bendaggi convenzionali, con una guarigione più rapida delle ulcere di dimensioni < 4 cm. Lo studio dimostra che l'uso del kit Sigvaris ULCER X è efficace nel trattamento delle ulcere venose alle gambe.

Inoltre, i risultati dimostrano che i pazienti trattati con il kit ULCER X accusano meno dolore e disagio e possono dedicarsi in misura maggiore alle loro normali attività.

### Messaggio conclusivo

Il trattamento delle ulcere venose alle gambe con il kit ULCER X è più efficace rispetto ai bendaggi convenzionali ed è più apprezzato dai pazienti.